

L&G

**Scooter Wisking 4024
(Sdoma X1)**



Bedienungsanleitung

Ausgabe 28.12.2018

Einführung

Bitte lesen und befolgen Sie alle Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung, bevor Sie Ihren Scooter zum ersten Mal zu bedienen. Wenn Ihnen Informationen in diesem Handbuch fehlen oder Sie zusätzliche Unterstützung bei der Einrichtung benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren autorisierten L&G-Anbieter.

Damit Sie lange Freude an Ihrem L&G Produkt haben, lesen Sie bitte sorgfältig die Bedienungsanleitung, befolgen Sie alle Anweisungen und beachten Sie die Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen.

Die Firma L&G übernimmt keine Haftung für gesundheitliche Schäden oder Verletzungen, die durch Missachtung der Sicherheitshinweise oder durch leichtsinnige Benutzung entstehen. Auch ist eine Haftung für Anwenderfehler Dritter ausgeschlossen.

Die folgenden Symbole werden in dieser Bedienungsanleitung verwendet, um Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen zu kennzeichnen. Es ist sehr wichtig die Bedienungsanleitung vollständig zu lesen und zu verstehen.



WARNUNG! Macht auf eine mögliche Gefahrensituation aufmerksam, die zu schwersten Verletzungen von Personen oder zum Tode führen könnte, wenn der bezeichneten Anweisung nicht exakt Folge geleistet wird.



VORSICHT! Dies ist eine Warnung vor einer möglichen Gefahrensituation, mit der Folge von mittleren oder leichten Verletzungen, wenn der bezeichneten Anweisung nicht exakt Folge geleistet wird



VORSICHT! Explosionsgefahr!



HINWEIS! Dies ist ein Hinweis auf nützliche Informationen zum sicheren und sachgerechten Umgang.



VORSICHT! Dies ist eine Warnung vor einer möglichen Kippgefahr



VORSICHT! Vor Nässe schützen

Inhaltsverzeichnis

1. EINFÜHRUNG	4
2. SICHERHEIT	7
3. EMI/RFI/EMC	12
4. IHR SCOOTER	14
5. BETRIEB	16
6. BATTERIE UND LADUNG	24
7. FEHLERBEHEBUNG	25
8. PFLEGE UND WARTUNG	26
9. GARANTIE	27
10. TECHNISCHE DATEN	28
11. KONFORMITÄTSERKLÄRUNG	29

1. EINFÜHRUNG

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen L&G Scooters. Dieses Gerät kombiniert die fortschrittlichsten Komponenten und neueste Technik mit modernem, attraktivem Design. Wir sind sicher, dass die innovative Technik und der störungsfreie Betrieb Ihr tägliches Leben erleichtern und Sie unabhängiger machen.

Bei L&G ist Ihre Sicherheit das Wichtigste für uns. Bitte lesen und befolgen Sie alle Anweisungen in diesem Handbuch, bevor Sie versuchen, Ihren Scooter zum ersten Mal zu bedienen. Diese Anleitung wurde zu Ihrer Sicherheit erstellt. Für den sicheren Betrieb Ihres neuen L&G Scooters ist es zwingend nötig, sich an alle im Handbuch aufgeführten Warnungen und Hinweise zu halten.

L&G haftet nicht für Sach- oder Personenschäden, die durch die unsachgemäße Verwendung von L&G Scooter entstehen. L&G haftet auch nicht für Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Benutzung oder Anwendung entstehen. Beachten Sie außerdem Hinweis, die durch L&G herausgegeben werden und unter Umständen nicht in diesem Handbuch enthalten sind. Dieses Handbuch stellt den neuesten Stand aller Erkenntnisse zum Produkt dar. Wir behalten uns Änderungen und Aktualisierungen des Handbuches vor. Es ist möglich, dass es einen geringfügigen Unterschied zwischen einer Änderung unseres Produkts und der Illustration des Handbuchs, der Erklärung und des von Ihnen erworbenen Produkts gibt. Sollten Sie nach dem Durchlesen der Gebrauchsanweisung Fragen zum Produkt haben, oder das Gefühl haben das Gerät trotzdem nicht sicher bedienen zu können wird Ihnen Ihr L&G Händler gerne behilflich sein. Wenn Sie einen Rat oder eine Bitte haben, kontaktieren Sie uns bitte per Telefon, Fax oder hinterlassen Sie eine Nachricht auf unserer Website. Wir werden uns Bemühen, alle ihre Frage zu beantworten, auf Anregungen einzugehen und dafür zu sorgen, dass Sie mit unserem Gerät zufrieden sind. Wir hoffen, dass Sie in Ihrem L&G Gerät einen Freund fürs Leben finden.

	Wisking Electric Machine Co., Ltd No.168 Ping Gang Road, Situan Town			
Import Unternehmen und Bevollmächtigter	L+G Technik GmbH & Co.KG Gewerbepark 1,3 96155 Buttenheim			
	Tel :	+49 9545 35980-211	Fax :	09545 35980-29
		E-Mail : info@l-g-technik.de		
Website	www.l-g-technik.de			



WARNUNG! Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen.

1. EINFÜHRUNG

Wichtiger Hinweis.

Teile dieser Bedienungsanleitung unterliegen dem Urheberrecht. Dieses Handbuch dient der Unterstützung der Benutzer des Wisking 4024 Scooter. Es ist gleichzeitig das Begleitheft Ihres neuen Wisking 4024 Scooters. Die Verbreitung dieses Handbuch darf nur in Verbindung mit einem Wisking 4024 Scooter erfolgen, Veränderungen oder Kopien erfordern die Einwilligung des Herstellers. Die Texte, Zeichnungen und Bilder in dieser Bedienungsanleitung dienen ausschließlich der Veranschaulichung und dem leichteren Verständnis. Technische Details können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern.

Handelsmarke

Wisking Electric Scooter ist registrierte Handelsmarke von 4024. Dieses Produkt ist durch Sodoma GmbH patentiert.

Hinweis für die Benutzung

Der Wisking 4024 ist gebaut und konzipiert um kurze Strecken bequemer und komfortabler zu machen.

Anforderungen an den Benutzer

Dieses motorisierte, dreirädrige Fahrzeug mit batteriebetrieb ist für kurze Strecken ausgelegt.

Der Benutzer muss über eine ausreichende Sehkraft verfügen, und zudem über einen längeren Zeitraum das Gleichgewicht halten können, über eine gute Reaktionsfähigkeit verfügen und selbstständig den Scooter besteigen und verlassen können. Außerdem ist es notwendig Entfernungen einschätzen zu können und Gefahren rechtzeitig zu erkennen.

Über dieses Handbuch

Dieses Handbuch ist unverzichtbar für die sichere Benutzung des Scooters und muss vor der ersten Benutzung sorgfältig gelesen werden.

Es enthält alle wichtigen Anweisungen und Hinweise, um den Scooter sicher zu bedienen, zu warten, zu Laden und um ihn zu transportieren.

Der Zweck des Handbuchs ist es, Sie vorzubereiten und Sie mit dem Produkt und all seinen Fähigkeiten vertraut zu machen. Das Handbuch soll Ihnen alle Antworten auf Fragen geben, die während des Betriebs und der Benutzung des Scooters auftreten können. Wenn Sie eine Frage haben, auf die Sie keine Antwort gefunden haben, wenden Sie sich bitte an einen L&G -Händler in Ihrer Nähe oder an den technischen Support des Unternehmens per E-Mail oder Telefon.

Symbole und Warnungen.

1. EINFÜHRUNG

Hintergrund

Wisking 4024 ist ein fortschrittlicher Scooter, gemacht für Innenräume und Gehwegen. Sollten Sie den Gehweg benutzen, müssen sie sich an die gültigen Regeln für Fußgänger halten. Räumen Sie den Fußgängern Vorrang ein, und nehmen Sie besonders auf Seh- und Hörbehinderte Rücksicht die ihre Annäherung unter Umständen nicht wahrnehmen können.

Sollten Sie den Scooter zum ersten mal benutzen oder nach längerer Pause den Scooter wieder in Betrieb nehmen sollten Sie ein Training für sicheres Fahren absolvieren, gerade für unebene Untergründe. Sie müssen Ihr Reaktionsvermögen, Ihre Sehfähigkeit, Ihr Gleichgewicht, Ihre Fähigkeit lange zu sitzen realistisch einschätzen. Sie sollten eine regelmäßige Überprüfung ihrer Fahrtauglichkeit in Betracht ziehen.

Obwohl es in den meisten Ländern keine gesetzlichen Sehfähigkeitsanforderungen gibt, ist ein gutes Sehvermögen wichtig, um die Sicherheit des Scooters zu gewährleisten. Sie sollten in der Lage sein, Distanzen zu beurteilen, Hindernisse und Gefahren zu erkennen und Fußgänger und andere Verkehrsteilnehmer zu erkennen. Schlechte Augen können zu einem Unfall beitragen und könnten Sie für einen Schadenersatz haftbar machen. Die Sehschärfe kann sich mit dem Alter ändern. Es wird empfohlen, regelmäßige Sehtests durchzuführen.

Wenn Sie berechtigt sind, als schwer sehbehindert (blind) registriert zu werden, sollten Sie keinen Scooter fahren, da Sie sich selbst und andere gefährden könnten. Wenn Sie berechtigt sind, als sehbehindert (sehbehindert) registriert zu werden, sollten Sie mit Ihrem Augenarzt oder Arzt sprechen.

Wenn Sie regelmäßig Medikamente einnehmen, die Sie schläfrig machen, sollten Sie überlegen, ob Sie einen Scooter verwenden können. Wenn Sie Zweifel haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt. Sie sollten keinen Scooter benutzen, wenn Sie Alkohol getrunken haben.

Der Scooter kann auf Gehwegen, Bürgersteigen, Reitwegen und in Fußgängerzonen verwendet werden und kann auf der Straße verwendet werden, wenn kein Gehsteig vorhanden ist oder wenn die Straße überquert werden muss.

Zertifizierung

Der Mobility Scooter 4023 ist konstruiert um die Normen 93/42/EEC und EN12184 zu entsprechen

2. SICHERHEIT

ALGEMEIN:

Ihr Scooter ist ein hochmodernes Gerät zur Steigerung der Mobilität. L+G bietet eine umfangreiche Produktvielfalt, die den individuellen Bedürfnissen des Scooternutzer am besten entspricht. Bitte beachten Sie, dass die endgültige Auswahl und Kaufentscheidung bezüglich des zu verwendenden Scooters in der Verantwortung des Scooternutzers liegt.

Der Inhalt dieser Bedienungsanleitung ist darauf ausgelegt, dass der Scooter durch den Händler oder medizinisches Fachpersonal an den Benutzer angepasst wurde.

Im täglichen Gebrauch, werden Sie wahrscheinlich auf Situationen stoßen, in denen Sie etwas üben müssen. Nehmen Sie sich einfach Zeit und Sie werden bald volle und sichere Kontrolle haben, auch in anspruchsvolleren Situationen, wie zum Beispiel beim Durchfahren von Türen, auf Rampen, bei der Benutzung von Aufzügen oder im unebenen Gelände.

MODIFIZIERUNG

Ihr Scooter wurde für maximale Mobilität und Flexibilität entwickelt und konstruiert. Eine große Auswahl an Zubehör ist bei Ihrem autorisierten L&G-Anbieter erhältlich, um ihren Scooter weiter an Ihre Bedürfnisse und Vorlieben anzupassen. Unter keinen Umständen sollten Sie jedoch Teile verändern oder Funktionen von Scootern modifizieren, hinzufügen, entfernen oder deaktivieren.



WARNUNG! Verändern Sie Ihren Scooter nicht ohne mit L&G Rücksprache zu halten. Eigenmächtige Veränderungen können zu Verletzungen und / oder Schäden an Ihrem Scooter führen.

ABNEHMBARE TEILE



VORSICHT! Versuchen Sie nicht, einen Scooter an einem seiner abnehmbaren Teile anzuheben oder zu bewegen, da dies zu Verletzungen und Schäden am Scooter führen kann.

SICHERHEITSPRÜFUNG

Lernen Sie ein Gefühl für Ihren Scooter zu bekommen und dessen Fähigkeiten kennen. Es wird empfohlen, vor jeder Verwendung eine Sicherheitsprüfung durchzuführen, um sicherzustellen, dass Ihr Scooter problemlos und sicher funktioniert. Weitere Informationen zur Durchführung dieser erforderlichen Inspektionen finden Sie unter 9. "Pflege und Wartung".

Führen Sie die folgenden Überprüfungen durch, bevor Sie Ihren Scooter verwenden:

- Überprüfen Sie die Bremsen
- Überprüfen Sie die Batterieladung

2. SICHERHEIT

GEWICHTSBESCHRÄNKUNG

Ihr Scooter ist für eine maximale Gewichtskapazität von „siehe 11. Technische Daten“ ausgelegt. Bitte beachten Sie die Hinweise in der Spezifikationstabelle.



WARNUNG! Eine Überschreitung der Gewichtsgrenze führt zum Erlöschen der Garantie und kann zu Verletzungen und Schäden an Ihrem Scooter führen. L&G haftet nicht für Verletzungen und / oder Sachschäden, die aus der Nichteinhaltung von Gewichtsbeschränkungen resultieren.

WARNUNG! Benutzen Sie ihren Scooter nur Alleine. Das Mitnehmen von Passagieren auf Ihrem Scooter kann zu Verletzungen und / oder Sachschäden führen.

STUFEN UND GEFÄLLE

Immer mehr Gebäude haben Rampen mit bestimmten Neigungswinkeln für einen einfachen und sicheren Zugang. Einige Rampen haben Drehkeilkurven (180-Grad), die ein gutes Kurvenverhalten auf dem Scooter erfordern.

Wenn Sie eine Steigung erklimmen, versuchen Sie, Ihren Scooter in Bewegung zu halten. Wenn Sie anhalten müssen, starten Sie langsam und beschleunigen Sie dann vorsichtig. Wenn Sie eine Steigung hinunterfahren, stellen Sie das Geschwindigkeitseinstellrad auf die langsamste Einstellung und fahren Sie nur in Vorwärtsrichtung. Wenn Ihr Scooter schneller als erwartet oder gewünscht die Steigung hinunterfährt, lassen Sie ihn durch Loslassen des Gashebels vollständig zum Stillstand kommen. Schieben Sie dann den Gashebel etwas nach vorne, um eine kontrollierte Abfahrt zu gewährleisten.



WARNUNG! Sie dürfen sich nicht auf einer möglicherweise gefährlichen Steigung bewegen (d. H. Bereiche, die mit Schnee, Eis, Gras oder nassen Blättern bedeckt sind).

WARNUNG! Fahren Sie nicht quer zum Berg, um ein Umkippen zu vermeiden.

Der Sicherheitssteigungswinkel des Scooters beträgt 10°



Bild 1

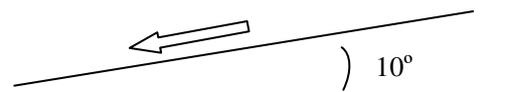


Bild 2

Abbildungen 1+2 zeigen die Stabilität Ihres Scooters und seine Fähigkeit, unter verschiedenen Gewichtsbelastungen und unter kontrollierten Testbedingungen Schrägen zu befahren. Diese Tests wurden mit dem Scooter-Sitz in der höchsten Position in hinterster Stellung durchgeführt.

Bild 2 zeigt die Fähigkeit Ihres Scooters, Steigungen hinaufzufahren und wie sie durch Gewicht, Geschwindigkeit, Neigungswinkel und Sonderausstattung beeinflusst wird.

KURVEN

Zu hohe Kurvengeschwindigkeiten können zu Kippproblemen führen. Faktoren, die die Kippgefahr beeinflussen, sind unter anderem Kurvengeschwindigkeit, Lenkwinkel (wie scharf Sie ein Kurve fahren), unebene Straßenoberflächen, sowie glatte Straßenoberflächen.

2. SICHERHEIT

Gerade beim Wechsel von Untergründen, bei engen Kurven und bei abrupten Richtungsänderungen kann der Scooter kippen. Sollten Sie das Gefühl haben, dass der Scooter zu kippen beginnt, lehnen Sie sich gegen die Kipprichtung, verringern Sie die Geschwindigkeit und vergrößern Sie den Kurvenradius.



WARNUNG! Wenn Sie enge Kurven fahren, reduzieren Sie Ihre Geschwindigkeit. Dies verringert die Möglichkeit von Kipp- oder Sturzgefahr erheblich, wenden Sie bei Kurvenfahrten immer gesunden Menschenverstand an.

FAHREN AUF VERSCHIEDENEN UNTERGRÜNDE.

Unser Scooter ist so konstruiert, dass er unter normalen Fahrbedingungen optimale Stabilität bietet - trockene, ebene Oberflächen aus Beton, Asphalt oder Pflaster. Es wird jedoch Zeiten geben, in denen andere Oberflächenarten auftreten. Aus diesem Grund ist Ihr Scooter so konzipiert, dass er auf festem Boden, Gras und Schotter hervorragend funktioniert. So benutzen Sie Ihren Scooter sicher auf Rasenflächen und in Parkanlagen.

- Reduzieren Sie die Geschwindigkeit beim Fahren auf unebenem Gelände oder Oberflächen.
- Vermeiden Sie hohes Gras, das sich im Fahrwerk verfangen kann.
- Vermeiden Sie über Kies und Sand zu fahren
- Wenn Sie sich bei einer Fahrfläche unsicher fühlen, vermeiden Sie diese Oberfläche.
- Der Bremsweg liegt in Abhängigkeit von der Fahrbeschaffenheit und Geschwindigkeit.
- Bremsen Sie frühzeitig vor Hindernisse/Personen ab!

WEITERE VORSICHTSMASSNAHMEN



VORSICHT! L&G empfiehlt, den Scooter nicht bei vereisten oder rutschigen Untergründen oder auf gesalzene Oberflächen (d. H. Gehwegen oder Straßen) zu betreiben. Ein solcher Gebrauch kann zu Unfällen, Verletzungen oder Beeinträchtigungen der Leistung und Sicherheit Ihres Scooters führen.

VORSICHT! Betreiben und lagern Sie Ihren Scooter nicht an Orten, an denen er ungünstigen Witterungsbedingungen wie Regen, Schnee, Nebel und Temperaturen unter dem Gefrierpunkt ausgesetzt ist (z. B. Lagerung im Freien oder im Carport). Die Elektronik kann beschädigt werden.

2. SICHERHEIT

TREPPEN UND STUFEN

Scooter sind nicht ausgelegt, Treppen oder Rolltreppen hoch oder runter zu fahren. Benutzen Sie immer einen Aufzug.



WARNUNG! Verwenden Sie Ihren Scooter nicht, um Treppen oder Rolltreppen zu überwinden. Sie könnten sich und andere Personen verletzen und / oder Ihren Scooter beschädigen.

AUFZÜGE

Moderne Aufzüge haben einen Sicherheitsmechanismus der ein Einklemmen zwischen den Türen verhindert. Dieser wird durch einer Lichtschranke oder einer Schutzkontaktleiste gesteuert. Vergewissern Sie sich stets, dass Ihr Scooter, die Türe des Aufzugs nicht blockiert.

BATTERIEEN

Beachten Sie die folgenden Warnhinweise und alle anderen Informationen zur Handhabung von Batterien

TREPPEN UND STUFEN

Scooter sind nicht ausgelegt, Treppen oder Rolltreppen hoch oder runter zu fahren. Benutzen Sie immer einen Aufzug.



WARNUNG! Verwenden Sie Ihren Scooter nicht, um Treppen oder Rolltreppen zu überwinden. Sie könnten sich und andere Personen verletzen und / oder Ihren Scooter beschädigen.

AUFZÜGE

Moderne Aufzüge haben einen Sicherheitsmechanismus der ein Einklemmen zwischen den Türen verhindert. Dieser wird durch einer Lichtschranke oder einer Schutzkontaktleiste gesteuert. Vergewissern Sie sich stets, dass Ihr Scooter, die Türe des Aufzugs nicht blockiert.

BATTERIEEN

Beachten Sie die folgenden Warnhinweise und alle anderen Informationen zur Handhabung von Batterien

2. SICHERHEIT



VORSICHT! Schützen Sie die Batterien immer vor Frost und laden Sie niemals Batterie bei Temperaturen unter 0°C auf. Das Laden einer zu kalten Batterie kann zu Verletzungen und / oder Schäden an der Batterie führen.

BATTERIE ENTSORGUNG UND RECYCLING

Wenn Sie eine beschädigte oder defekte Batterie haben, legen Sie diese sofort in eine Plastiktüte und wenden Sie sich zur Entsorgung an Ihren autorisierten L&G Partner. Dieser verfügt auch über die notwendigen Informationen zum Recycling von Batterien. Dies ist unsere empfohlene Vorgehensweise.

FAHRZEUGTRANSPORT



VORSICHT! Setzen Sie sich nicht auf Ihren Scooter, während er sich in einem sich bewegenden Fahrzeug befindet. Verletzungen und / oder Sachschäden können die Folge sein.

VORSICHT! Vergewissern Sie sich immer, dass Ihr Scooter und seine Batterien während des Transports ordnungsgemäß gesichert sind. Nichtbeachtung kann zu Verletzungen und / oder Schäden an Ihrem Scooter führen.

VERMEIDUNG UNBEABSICHTIGTER BEWEGUNG



VORSICHT! Wenn Sie vorhaben, für längere Zeit am gleichen Ort verweilen, schalten Sie das Gerät aus. Dies verhindert eine unerwartete Bewegung durch einen unbeabsichtigten Kontakt mit dem Steuerhebel. Nichtbeachtung kann zu Verletzungen führen.

AUF UND ABSTEIGEN

- Stellen Sie sicher, dass sich Ihr Scooter nicht im Freilauf befindet.
- Die Sitzarmlehnen können hochgeklappt werden, um das Ein- und Aussteigen zu ermöglichen.



WARNUNG! Setzen Sie sich im Scooter-Sitz so weit wie möglich nach hinten, um zu vermeiden, dass der Scooter kippt und Verletzungen verursacht.



WARNUNG! Lehnen Sie sich während der Fahrt nicht seitlich gegen die Armlehnen. Seitliche Belastung kann dazu führen, dass der Scooter kippt und Verletzungen verursacht.



VORSICHT! Versuchen sie nicht Gegenstände vom Scooter aus vom Boden aufzuheben. Ein Lehnen über den Schwerpunkt des Scooters kann zum Kippen führen, durch den es zu Verletzungen und / oder Beschädigungen kommen kann.

3. EMI/RFI/EMV

Das Elektromobil genügt den Anforderungen der Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte mit Änderungsrichtlinie 2007/47/EWG."

(siehe Seite 25/26)



VORSICHT! Es ist äußerst Wichtig, dass Sie Diese Information über die möglichen Auswirkungen von Elektromagnetischer Überlagerung (EMÜ) auf Ihrem Elektromobil Lesen.

ELEKTROMAGNETISCHE STÖRUNG

Elektromobile können für EMÜ empfindlich sein, das heißt, für elektromagnetische Energie (EM), die von Quellen wie Radio- und Fernsehsendestationen, Amateurfunkgeräten, Funksende- und Empfangsgeräten ausgehen. Die Überlagerung (aus Radio-Quellen) kann dazu führen, dass sich das Fahrverhalten beeinflusst. Auch kann das Steuersystem des E-Mobils dauerhaft geschädigt werden. Die Stärke der störenden EM Energie wird in Volt pro Meter (V/m) gemessen. Jedes Elektromobil kann der EMÜ bis zu einer gewissen Stärke widerstehen.

Dies wird als die „Störfestigkeit“ des Elektromobils bezeichnet. Je höher die Störfestigkeit, desto größer der Schutz. Gegenwärtig bietet die Technik einen nützlichen Schutz gegen mindestens 20 V/m, was gegen die meisten allgemein verbreiteten EMÜ ausstrahlenden Quellen störfest macht. Es gibt eine Anzahl relativ starker EMÜ-Quellen in unserer täglichen Umgebung. Manche sind offensichtlich und leicht vermeidbar, andere sind weniger offensichtlich und können vielleicht nicht umgangen werden. Indem Sie den aufgelisteten Warnungen Folge leisten, halten Sie das Risiko der EMÜ auf einem Minimum. Die Quellen der EMÜ werden grob in drei Arten eingeteilt:

1. Tragbare Sende- und Empfangsgeräte (mit eingebauter Antenne). Beispiele dafür sind Walkie-Talkie, CB Funkgeräte, Sicherheitsdienst- Feuerwehr- und Polizeifunkgeräte, Handys. Denken Sie daran, dass manche Mobiltelefone im angeschalteten Zustand Signale abgeben können, selbst wenn die Geräte nicht in Benutzung sind.
2. Mobile Sende- und Empfangsgeräte mittlerer Reichweite, wie zum Beispiel Funksprechanlagen in Notdienstfahrzeugen, Taxis usw. Die Antenne ist normalerweise außen auf das Fahrzeug montiert. Sende- und Empfangsgeräte mit großer Reichweite, wie zum Beispiel kommerzielle Rundfunk- und Fernsehtürme und Amateurfunkstationen.

Hinweis: Andere tragbare Geräte wie schnurlose Telefone, Laptop- Computer, Radios mit Amplituden- oder Frequenzmodulation, Fernsehgeräte, CD-Spieler, Kassettenrekorder und kleinere Geräte wie z.B. ein Rasierapparat oder Haarfön verursachen wahrscheinlich keine elektromagnetische Störung an Ihrem Elektromobil.

Elektromagnetische Überlagerung (EMÜ) bei Elektromobilen. Die EM-Energie wird schnell stärker, je näher man an die Sendeantenne, die Quelle, herankommt. Daher ist es möglich, dass starke EM-Felder unbeabsichtigt in die Nähe des Steuersystems ihres E-Mobils gebracht werden. Tragbare Sende- und Empfangsgeräte mit Funkwellen sind also besonders zu beachten.

3. EMI/RFI/EMV

Wenn solche Geräte benutzt werden, ist es möglich, dass die ausgesandte EM Strahlung das Fahrverhalten des E-Mobils beeinflusst. Es wird empfohlen, folgende Warnungen zu beachten, um mögliche elektromagnetische Störungen des Steuersystems Ihres E-Mobils zu vermeiden.

1. Benutzen Sie keine Sende- und Empfangsgeräte, die in der Hand gehalten werden, wie CB Funkgeräte.
2. Erkundigen Sie sich, wo sich lokale Funk- oder Fernsehsendestationen befinden, und fahren Sie nicht in deren Nähe.
3. Wenn unbeabsichtigte Fahrbewegungen erfolgen oder sich die Bremse löst, schalten Sie das E-Mobil AUS, sobald Sie dies sicher tun können.
4. Das Anbringen von Nachrüstung oder Komponenten sowie Modifizierungen am E-Mobil können die Empfindlichkeit für EMÜ erhöhen. Hinweis: Es ist schwierig, die Wirkungen von EMÜ auf die Störfestigkeit zu vorauszuberechnen, wenn Modifikationen am E-Mobil vorgenommen worden sind.
5. Sollten EMÜ-Wirkungen auftreten, berichten Sie diese bitte Ihrem Händler, möglichst mit der Angabe, welche potentiellen EMÜ-Quellen in der Nähe waren.

4. IHR SCOOTER



WARNUNG! Ein Scooter ist kein Spielzeug und darf nicht von Kindern benutzt werden. Sollten Kinder den Scooter benutzen, muss dies unter der Aufsicht eines Erwachsenen erfolgen, der sich mit dem Gerät auskennt und die Einhaltung der Sicherheitsanweisungen und Vorschriften überwacht!

Ihr Scooter ist ein motorisierter Elektroroller für den Innen- und Außenbereich, der entwickelt wurde, um Ihre persönliche Mobilität zu verbessern. Zum einfachen Transport oder Verstauen können Sie Ihren Scooter in drei Komponenten zerlegen.

Siehe folgende Abbildung:



4. IHR SCOOTER



- 1..Fahrkonsole
- 2.Richtungswahl
- 3.Gashebel / Bremse
- 4.Geschwindigkeitswahlschalter/ Ein-Ausschalter

5. Handgriffe

6. Arretierhebel für Lenkerneigung

7. USB Port

8.Lenkstange

9. Arretierung für Lenkstangenhöhenverstellung

10. Mittlere Freigabetaste

11. Entriegelungsknopf

12. Haupthandgriff

13. Sitzhandgriff


14. Verriegelung am Sitzhandgriff

15.Batterie

16. Batterieverriegelung

17. Hintere Abdeckung

18. Vorderradverriegelungshebel

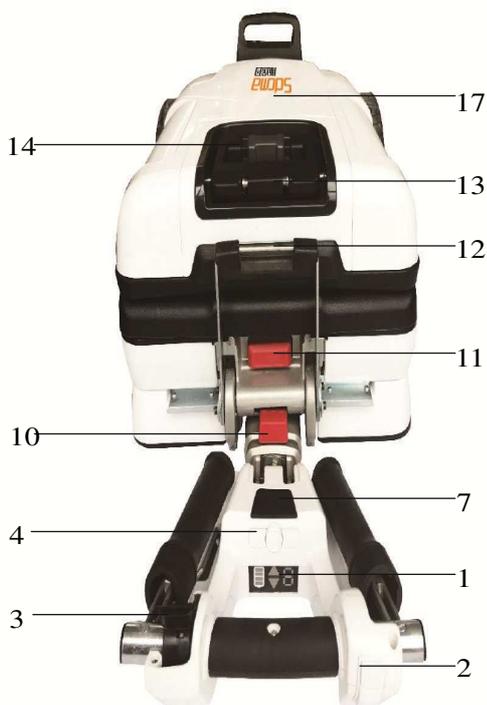

5. BETRIEB

Der Wisking 4024 ist sehr leicht zu benutzen; es bedarf keine besonderen Fähigkeiten und kann durch befolgen der einzelnen Schritte der folgenden Seiten und Übung erlernt werden.

1. Vergewissern Sie sich, dass ihr Wisking 4024 zum Öffnen auf Ebenen Untergrund steht. Zum Aufbau werden 2 Meter Platz benötigt.

2. Entriegeln Sie die Lenkerarretierung und klappen Sie diese nach oben. Verriegeln Sie den Arretier Hebel anschließend wieder (siehe Abbildung 4).

3. Drücken Sie die mittlere Freigabetaste und klappen Sie

den Lenker nach vorne. (Abbildung 5)

4. Drücken Sie den Entriegelungsknopf und drücken Sie den Lenker vom Gehäuse weg (Siehe Abbildung 6)

5. Halten Sie 4024 mit zwei Händen (siehe Abbildung 7).

6. Drücken Sie das Mittelteil nach unten, bis die Vorderräder den Boden berühren. (Siehe Abbildung 8).



Abbildung 4



Abbildung 5



Abbildung 6



Abbildung 7



Abbildung 8

5. BETRIEB

7. Benutzen Sie den Haupthandgriff um Vorder- und Hinterräder voneinander weg zu bewegen (siehe Abbildung 9).



Abbildung 9

8. Drücken Sie den Hebel am Boden sanft nach unten, bis er in der Mulde liegt (siehe Abbildung 10).



Abbildung 10

9. Drücken Sie den Verriegelungshebel über dem Vorderrad, bis er mit einem hörbaren Klicken einrastet (siehe Abbildung 11).



Abbildung 11

10. Schieben Sie die Verriegelung am Sitzhandgriff nach rechts und ziehen Sie den Handgriff nach oben. Ziehen Sie den Sitz nach hinten oben, bis er einrastet. Ziehen Sie anschließend die Rückenlehne vom Sitz senkrecht bis oben, bis sie einrastet. Klappen Sie den Sitz herunter. (Abbildung 12).



Abbildung 12

11. Lösen Sie den Klemmhebel an der Lenkstange und stellen Sie den Lenker auf die gewünschte Höhe ein. (Abbildung 13)



Abbildung 13

5. BETRIEB

Klappen sie die Handgriffe nach oben. (Abbildung14).

Um einen ordnungsgemäßen Betrieb zu gewährleisten, drehen Sie den Griff nicht um 180 Grad aus der geschlossenen Position. Wenn Sie die Lehne nicht nach hinten klappen konnten, bringen Sie den Griff wieder in seine ursprüngliche Position und versuchen Sie es erneut.

12. Fahren Sie fort, indem Sie mit dem Griff die Lehne nach oben ziehen, bis diese mit einem hörbaren Klicken einrastet

(Abbildung 15)

Steigen Sie nicht auf, bevor der Sitz arretiert ist.

13. Öffnen Sie an beiden Seiten die Verriegelung und klappen Sie die Lenker nach oben

(siehe Abbildung 16).

Einstellen der Lenkerhöhe

Lösen Sie den Arretier hebel um den Lenker auf Ihre gewünschte Höhe einzustellen. Verriegeln Sie den Arretier Hebel nach dem Einstellen wieder

(Siehe Abbildung 17).

Sitzhöhenverstellung

Obwohl der Sitz des Wisking 4024 dünn und stilvoll ist, wurde er für Komfort und Sicherheit konzipiert und kann den Vorlieben des Benutzers angepasst werden. Der Sitzmechanismus kann in einer von drei festen Höhen arretiert werden. Es ist kein Werkzeug erforderlich. Um die Sitzhöhe einzustellen, gehen Sie wie folgt vor.



Abbildung 14



Abbildung 15



Abbildung 16

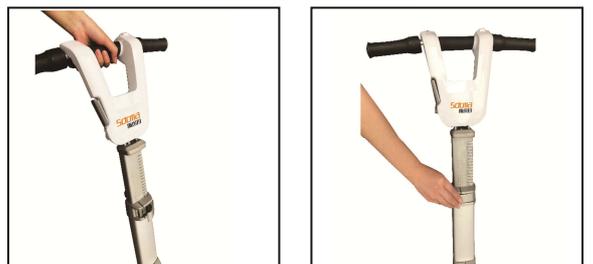


Abbildung 17

5. BETRIEB

1. Der Wisking 4024 muss geöffnet sein. Öffnen Sie die Abdeckung für die Sitzhöhenverstellung. Diese befindet sich an der rechten Unterseite.

2. Unter der Abdeckung finden Sie einen Sicherheitsstift aus Metall. Ziehen Sie ihn mit zwei Fingern heraus. Merken Sie sich die Position, das macht es leichter ihn wieder hinein zu stecken.

3. Wenn der Sicherheitsstift heraus gezogen ist, sollte sich der Justierbolzen (Steckt in einem von vier Höheneinstellungen) herausziehen lassen. Ziehen Sie den Bolzen nur heraus während Sie mit der anderen Hand den Sitz halten .



Abbildung 18

Fahrkonsole

Die Fahrkonsole beinhaltet alle Anzeigen und Bedienelemente die Sie während der Fahrt benötigen.



Abbildung 19

EIN/AUS und Geschwindigkeitswahlschalter

A. Der EIN/AUS Schalter befindet sich in der Mitte der Fahrkonsole unterhalb des Displays. Um den Wisking 4024 zu starten drücken Sie EIN und halten Sie ihn gedrückt bis der Scooter startet.

B. Die zwei Knöpfe neben EIN/AUS sind markiert mit "+" und "-" um Ihre Geschwindigkeit einzustellen. Die Zahl auf dem Display beim drücken dieser Tasten gibt die Höchstgeschwindigkeit an, die der Scooter fahren wird, wenn Sie Vollgas geben. Drücken Sie im Stand die "+" Taste um die Höchstgeschwindigkeit herauf zu setzen oder die "-" Taste um das Tempo zu reduzieren.



Abbildung 20



Abbildung 21

Batterieanzeige

Wenn der Scooter eingeschaltet ist wird am Display der aktuelle Ladezustand angezeigt. Wie bei allen Lithiumakkus ist die Anzeige nur genau, wenn der Akku beim Einschalten vollgeladen ist. Alle anderen Angaben sind Näherungswerte und sollen Ihnen einen ungefähren Überblick über den Ladezustand der Batterie geben. Weitere Informationen zur Reichweite Ihres Akkus finden Sie im Kapitel "Spezifikation" in dieser Bedienungsanleitung.

5. BETRIEB

Richtungsmode – Der Wisking 4024 kann Vorwärts- und Rückwärtsfahren. Die aktuell eingestellte Fahrtrichtung wird mittels Pfeil im Display angezeigt. Um die Fahrtrichtung zu ändern muss man sie am Fahrtrichtungsschalter am linken Handgriff umschalten.



Abbildung 22

Gashebel

Der Gashebel wird zum Losfahren, sowie zur Kontrolle der Geschwindigkeit benutzt. Legen Sie ihren Daumen auf den Gashebel und drücken Sie ihn nach unten um zu beschleunigen. Um das Tempo zu reduzieren, nehmen Sie ihren Daumen nach oben, bis sie Ihre Komfortgeschwindigkeit erreichen. Wenn Sie den Gashebel in die OFF Position bringen, wird der Scooter innerhalb von 1,8 Metern zum Stillstand kommen.



Abbildung 23

Einschalten des Wisking 4024

Drücken Sie den "EIN" Schalter und halten Sie ihn gedrückt. Alle Kontrollleuchten werden sich für einen Moment einschalten. Stellen Sie vorsichtig Ihre Füße mittig auf das Trittbrett, nehmen Sie eine bequeme und sichere Haltung ein.

Absteigen vom Wisking 4024

1. Vergewissern Sie sich, dass der Scooter ausgeschaltet ist.
2. Stellen Sie vorsichtig Ihre Füße auf beiden Seiten auf den Boden und stehen Sie gleichmäßig und Senkrecht auf.
3. Verlassen Sie den Scooter.

Fahren

BEACHTEN SIE

KONTROLLIEREN SIE FOLGENDE DINGE BEVOR SIE DEN SCOOTER VERWENDEN:

1. Vergewissern Sie sich, dass die Batterie eingelegt und verriegelt ist und nicht über die Abdeckung hinaussteht.
2. Vergewissern Sie sich, dass die Batterie vollgeladen ist oder die Ladung für die geplante Strecke ausreichend ist.
3. Vergewissern Sie sich, dass der Antrieb eingekuppelt ist und alle beweglichen Teile in der richtigen Position und verriegelt sind.
4. Wählen Sie die Fahrtrichtung.

5. BETRIEB

Vorwärts fahren

1. Legen Sie Ihre Hände auf den Lenker, benutzen Sie ihren rechten Daumen um vorsichtiges Gas zu geben, indem Sie den Gashebel vorsichtig und langsam nach unten drücken.
2. Wenn Sie mit ihren Daumen den Druck erhöhen steigt die Geschwindigkeit.
3. Um den Wisking 4024 zum Anhalten zu bringen nehmen Sie ihren Daumen vom Gashebel. Der Gashebel wird in die obere "aus" Position springen und der Scooter wird schnell zum Stehen kommen.

Rückwärts fahren

1. Halten Sie den Wisking 4024 an. Drücken Sie mit einem Finger der linken Hand den Rückwärtsknopf an der linken Seite der Bedienkonsole für 3 bis 5 Sekunden.
2. Wenn Sie einen kurzen Doppelpieps hören hat der Wisking 4024 die Richtung gewechselt. (Kontrollieren Sie das Display!) Geben Sie mit dem rechten Daumen langsam Gas um Rückwärts zu fahren.
3. Geben Sie mehr Gas um die Geschwindigkeit zu erhöhen.
4. Um den Wisking 4024 zum Anhalten zu bringen nehmen Sie ihren Daumen vom Gashebel. Der Gashebel wird in die obere "aus" Position springen und der Scooter wird schnell zum Stehen kommen.

Anhalten

Lassen Sie nur den Gashebel los, er springt von alleine in die obere Position (Aus). Der Scooter bremst von alleine indem er im Motor einen Widerstand aufbaut. Anschließend schaltet der Scooter in den "Parkmodus" bei dem er eine Elektro-Mechanische Bremse benutzt.

Notbremsung

Für den Fall das der Scooter nicht stoppt, auch wenn Sie den Gashebel los gelassen haben, drücken sie den "EIN/AUS" Schalter. Der Scooter wird sich ausschalten und sofort stehen bleiben.



WARNUNG! Wenn Sie zu stark einlenken, kann der Scooter umkippen. Vermeiden Sie diese Gefahr, indem Sie einem großen Radius um Ecken und Hindernisse lenken. Verringern Sie außerdem die Geschwindigkeit, bevor Sie Kurven fahren, um die Gefahr des Umkippens zu vermeiden.



WARNUNG! Der Anhalteweg auf Gefällestrecken kann erheblich größer sein als auf ebenem Boden.

5. BETRIEB

Abbau (schließen)

1. Vergewissern Sie sich, dass der Scooter auf einer ebenen Fläche steht.



Abbildung 29

2. Klappen Sie beide Handgriffe nach unten (siehe Abbildung 29). Ziehen Sie beide Griffe waagrecht aus dem Lenker bis Sie den roten Strich sehen und drücken

Sie sie nach unten.



Abbildung 30

3. Ziehen Sie den hinteren Handgriff nach oben und lassen Sie den Sitz nach unten gleiten bis er einrastet (siehe Abbildung 30 & Abbildung 31).

4. Vergewissern Sie sich, dass der Sitz ganz unten ist (Abbildung 31).



Abbildung 31

5. Drücken Sie die Sitzlehne nach vorne bis ein klicken zu hören ist (Abbildung 36).



Abbildung 36

6. Ziehen Sie mit einer Hand den Griff nach oben, und drücken Sie dabei mit der anderen das Vorderrad mit der Lenkerstange nach hinten. Wenn für den vorderen Hebel zu viel Kraft erforderlich ist, sollten Sie den Hauptgriff in horizontaler Richtung zur Vorderseite des Rollers drücken. Dadurch wird der Druck auf den vorderen Hebel reduziert und das Öffnen erleichtert. Wechseln Sie anschließend die Hände. Halten Sie die Lenkerstange mit einer Hand aufrecht und heben Sie den Hauptgriff mit der anderen Hand an (siehe Abbildung 33).

7. Ziehen Sie die Mitte mit dem Hauptgriff nach oben und in Richtung der Lenkerstange, bis sie einrastet und einrastet.



Abbildung 33

5. BETRIEB

8. Lösen Sie den Arretier Hebel für die Lenkerstange und schieben Sie den Lenker in die unterste Position. Verriegeln Sie anschließend die Lenkerstange wieder (Abbildung 35).



Abbildung 35

9. Klappen Sie den Lenker an das Gehäuse und verriegeln Sie ihn dort. (Abbildung 36)



Abbildung 36

Batterie und Ladegerät

Das Ladegerät vom Wisking 4024 ist ein kleines, aber intelligentes und leistungsstarkes Ladegerät, das an das 230V Stromnetz angeschlossen werden kann. Es ist sicherheitstechnisch geprüft.

1. Schließen Sie beim Anschließen des Ladegeräts das Ladekabel an den Akkuladestecker an, bevor Sie das Netzkabel des Ladegeräts einstecken.
2. Wenn Sie das Ladegerät trennen, tun Sie dies immer in umgekehrter Reihenfolge

Entnehmen der Batterie

Um die Batterie zu entnehmen, drücken Sie den Entriegelungsknopf und nehmen Sie die Batterie heraus (Abbildung 40).



Abbildung 40

Einsetzen der Batterie

Legen Sie die Batterie mit dem Ende zuerst ein. Dann drücken sie die Batterie nach unten bis er mit einem hörbaren kicken einrastet (Abbildung 39).



Abbildung 39

6. BATTERIE UND LADUNG

1. Der neue Akku MUSS vor der ersten Verwendung von Wisking 4024 vollständig aufgeladen werden. Laden Sie den neuen Akku IMMER vor dem ersten Gebrauch vollständig auf, oder die Lebensdauer des Akkus wird verkürzt.
2. Lagern Sie den Akku nicht bei einem Ladezustand von unter 60%. Laden Sie nötigenfalls den Akku, wenn Sie ihn länger nicht benutzen.
3. Benutzen Sie nur das Originalladegerät.
4. Verwenden Sie kein Verlängerungskabel am Ladegerät. Dies kann zu Überhitzung, Brand oder einem Stromschlag führen. Der Akku von Wisking 4024 ist sehr leistungsfähig. Ein Kurzschluss am Ladegerät kann zu Verbrennungen oder anderen Verletzungen sowie zu Schäden an der Batterie und den elektronischen Komponenten Ihres Motorrollers führen.

Laden der Batterie

1. Vermeiden Sie eine Tiefentladung des Akkus. Laden Sie den Akku spätestens wenn die Spannungsanzeige zwei grüne Balken zeigt.
2. Wenn Sie den Akku einlegen, vergewissern Sie sich, dass dieser zu mindestens zu 60%, besser aber vollgeladen sind
3. Schließen Sie das Ladegerät an die Steckdose an. Die LED sollte grün leuchten, um anzuzeigen, dass das Ladegerät ordnungsgemäß an die Steckdose angeschlossen ist.
4. Verbinden Sie das andere Ladegerät mit dem Akku des Wisking 4024. Die Ladegerät-LED leuchtet rot, um anzuzeigen, dass der Akku nicht vollständig aufgeladen ist und der Ladevorgang stattfindet.
5. Wenn der Akku voll aufgeladen ist, leuchtet die LED grün. Dies kann bis zu 3-5 Stunden dauern. Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, trennen Sie das Ladegerät von der Steckdose und trennen Sie dann den Akku vom Ladegerät.



HINWEIS: Das Ladegerät kann am Akku angeschlossen werden, wenn der Akku im Scooter ist oder entnommen wurde

Verlängern der Lebensdauer des Akkus

Warnung: Bewahren Sie den Akku stets an einem kühlen und trockenen Ort auf um ihn vor Schäden zu bewahren.

TRANSPORTIEREN

1. Wisking 4024 kann mühelos zu Land, zu Wasser oder in der Luft transportiert werden.
2. Der Transport von Wisking 4024 in Verkehrsflugzeugen unterliegt den gesetzlichen Bestimmungen und den Richtlinien der Fluggesellschaften. Erkundigen Sie sich vor dem Flug bei Ihrer Fluggesellschaft, ob Ihr Wisking 4024 und sein Lithium-Ionen-Akku zulässig sind. Entfernen Sie für einen sicheren Transport den Akku und schließen sie alle Abdeckungen. Um Verletzungen zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass der Scooter fixiert ist und nicht herum rutschen oder umfallen kann.

7. FEHLERBEHEBUNG

FEHLERBEHEBUNG

Wenn Ihr Roller nicht funktioniert:

1. Stellen Sie sicher, dass das Ladegerät nicht an Ihren Scooter angeschlossen ist.
2. Überprüfen Sie, ob der Akku aufgeladen ist. Wenn Sie sich nicht sicher sind, können Sie es an das Ladegerät anschließen und auf die grüne LED warten.
3. Vergewissern Sie sich, dass die Batterie ordnungsgemäß in das Batteriegehäuse des Scooters eingesetzt ist und dass keine Fremdkörper wie Papier oder Schmutz den elektrischen Kontakt zwischen der Batterie und ihrem Anschluss beeinträchtigen.
4. Versuchen Sie, den Roller einzuschalten, indem Sie die Ein / Aus-Taste mindestens 2 Sekunden lang drücken. Wenn sich der Scooter nicht einschaltet, wenden Sie sich an einen autorisierten Wisking 4024-Händler.

WARTUNG

Die Lebensdauer des Wisking 4024 beträgt Erwartungsgemäß 8 Jahre durch gute Pflege und regelmäßige Wartung lässt sie sich jedoch verlängern. Führen Sie Wartungsarbeiten bei Bedarf, mindestens aber jährlich durch. Ersatzteile erhalten Sie bei Ihrem autorisierten Händler.

Reinigen des Gehäuses

Das Gehäuse des Wisking 4024 besteht aus ABS-Teilen, einem widerstandsfähigen Kunststoff mit integrierter Farbe. Um den Glanz von Wisking 4024 zu erhalten, können Sie ihn mit einem feuchteten Tuch reinigen.

Reifen und Felgen

Ihr Roller ist mit einem Frontmotor mit Vollreifen und zwei Hinterrädern mit Vollreifen ausgestattet. Dies bedeutet, dass sich in keinem der Reifen Luft befindet. Die Reifen sind mit Schaum gefüllt wodurch eine Reifenpanne unmöglich ist. Sollte ein Reifen wegen Beschädigung oder Abnutzung ausgetauscht werden müssen, wenden Sie sich bitte an Ihren autorisierten Fachhändler.

Schmierung

Es gibt zwei Bereiche, in denen mindestens alle sechs Monate oder bei Bedarf ein leichter Sprühnebel mit Silikonöl aufgetragen werden sollte. Vor allem dann, wenn der Wisking 4024 sich schwieriger Öffnen oder Schließen lässt. (Sie können andere Schmiermittel verwenden, sofern diese auf Aluminium und Kunststoff nicht klebrig oder ätzend wirken).

Schmierpunkte sind in Abbildung 41 dargestellt:



Abbildung 41

8. PFLEGE UND WARTUNG

1. Sitzschiene einschließlich Gleitbahn.

2. Radachsen.

Reinigen Sie die zu schmierenden Bereiche mit einem sauberen Tuch und lassen Sie keine Fasern, Sand oder Staub auf dem Scooter. Wenn Sie mit dem Scooter geschmiert und den ordnungsgemäßen und einfachen Betrieb getestet haben, reinigen Sie die gesamten umgebenden Teile von Schmiermittelresten.

Alle Lager Ihres Wisking 4024 sind permanent geschmiert und abgedichtet. Daher ist keine Schmierung erforderlich.

Batterie und Ladung

Ihr Scooter ist mit einer Lithium Ionen Batterie ausgestattet, die keinen Memory Effekt hat. Es ist nicht nötig die Batterie vor dem Laden vollständig zu entladen.

Wenn Sie wissen dass Sie ihren Wisking 4024 für einen längeren Zeitraum nicht verwenden werden, laden Sie den Akku zu mindestens 60% voll, bevor sie den Scooter einlagern. Die Batterien können bei einer normalen Raumtemperatur von 22°C problemlos bis zu 6 Monaten gelagert werden.

Wenn Sie ihren Scooter länger als einen Monat nicht benutzt haben, laden Sie die Batterie am besten über Nacht, bevor Sie ihn wieder in Betrieb nehmen.

Wenn Sie die Anweisungen im Benutzerhandbuch befolgen, wird sich die Lebensdauer Ihrer Batterie verlängern

Wenn es zu Korrosion an elektrischen Verbindungen am Scooter kommt, müssen Sie diese durch einen zugelassenen Techniker reinigen lassen.

Sollte es zu Korrosionen an den Anschlüssen der Batterie kommen, muss diese erneuert werden.



WARNUNG! BRANDGEFAHR! Decken Sie das Ladegerät und die Ventilationsöffnung nicht ab, während Sie das Ladegerät benutzen. Verwenden Sie das Ladegerät nur an gut belüfteten Orten.



Lassen Sie die Batterie nicht länger als 12 Stunden mit dem Ladegerät verbunden. Ansonsten kann die Batterie beschädigt werden oder es kann zu gefährlichen Situationen kommen.

Batterie

Der Wisking 4024 arbeitet mit extreme leichten, leistungsstarken 36V oder 42V Batterien. Diese ermöglichen bei einem Gewicht von nur 2 kg eine Reichweite von bis zu 15km bei einer Ladezeit von nur 4 Stunden. Sie können die Batterie im Scooter oder außerhalb laden. Um die Batterie zu entnehmen, drücken Sie den Entriegelungsknopf und ziehen Sie ihn heraus.

9. GARANTIE

Ersatzteile:

Wenn Sie Ersatzteile benötigen können Sie diese beim Importeur oder direkt bei Ihrem Händler vor Ort bestellen.

Eingeschränkte Garantie

Es wird versichert, dass der Scooter frei von Verarbeitungs- und Materialfehlern ist. Diese Garantie gilt für den gesamten gesetzlichen Garantiezeitraum.

Sollte trotz allem ein Problem auftreten, kontaktieren Sie bitte ihren Händler. Dieser wird versuchen gemeinsam mit Ihnen das Problem zu lösen. Sollte die vor Ort nicht möglich sein, wird er mit Ihnen vereinbaren wie das Gerät zur Reparatur zu ihm kommt.

Zur Abwicklung der Garantie wird immer die Seriennummer benötigt. Halten Sie diese für alle Rückfragen bereit. Senden Sie niemals das Gerät oder Teile davon ohne Rücksprache zur Reparatur ein. Wenn Sie etwas zurück schicken, legen Sie, auch wenn vorher abgesprochen eine kurze Fehlerbeschreibung bei.

Zweijahres Garantie

Rahmenkomponenten, einschließlich: Fahrgestell, Lenkmechanismus, Sitzmechanismus, Hinterräder.

Jahresgarantie

Antriebskomponenten, einschließlich: Ladegerät, Motor, Vorderradgabel und Bremse.

Für die Batterien gilt eine einjährige Garantie des Originalherstellers. Eine allmähliche Verschlechterung der Akkuleistung durch Nichtbeachtung der oder bei starkem Gebrauch ist von der Garantie ausgenommen.

Von der Garantie ausgenommen

- ABS Plastikteile
- Sitzbezug
- Reifen
- falsche Pflege oder fehlerhafte Behandlung
- Beschädigungen, die durch Unfälle
- Selbstständig durchgeführte Reparaturen
- Wenn die Seriennummer entfernt oder verändert wurde

Wenn Sie Probleme mit Ihrem Scooter haben, die Sie nicht selbst beheben können, wenden Sie sich umgehend an Ihren autorisierten L&G-Partner, um Informationen, Wartung und Service zu erhalten.

10. TECHNISCHE DATEN



HINWEIS! Ihr Scooter ist wie die meisten elektrischen Geräte anfällig für Schäden durch Witterungseinflüsse. Vermeiden Sie feuchte Bereiche jeglicher Art. Wasser kann Korrosion an elektrischen Bauteilen und Metallteilen verursachen.

Technische Daten von Wisking Wisking 4024 Hersteller: Wisking Electric Machine Co.,Ltd	
Gesamtabmaße	700*430*400mm 980*1230*585mm
Vorderreifen	20,30 cm
Hinterreifen	22,80 cm
Maximale Belastbarkeit	100kg
Controller	PG –S-Drive
Motor	LXB01W 36V
Batterie	42V
Ladegerät	42V/ 2A
Ladezeit	4-5 Std.
Eigengewicht inkl. Batterien	28,3kg
Reichweite	Bis zu 15km pro Ladung
Maximale Steigung	12 Grad

Technische Änderungen vorbehalten.

Sollten Sie Fragen zum Produkt haben oder technische Unterstützung benötigen, wenden Sie sich bitte unter Angabe der Typ Nr. an Ihren L&G-Partner oder kontaktieren Sie uns:

Hersteller:	
Wisking Electric Co.,Ltd. No.168 PingbeiVillage,SituanTown,Fengxian District, Shanghai,China	
Bevollmächtigter Vertreter:	
L&G Technik GmbH & Co.KG Im Gewerbepark 1,3 96155 Buttenheim Tel.: 09545 / 35980211 Mail: info@l-g-technik.de	
Typ	Seriennummer
Wisking 4024	WS _____
Zul.Ges.Gew.: 138 Kg	Motorleistung: 350W
Max.Speed: 0-6 km/h	CE Baujahr: 20__
Gewicht: 28 Kg	EN12184

Buttenheim am 20.12.2018

11.KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

SHANGHAI WISKING ELECTRIC MACHINE CO., LTD

0086-21-57142834 0086-21-13402073772

NO.168 Pinggang Road,Situan Town,Fengxian District,Shanghai,201413,China

Konformitätserklärung

PRODUKT	
Produktname	Modell-Nr
Wisking Mobility Scooter	4017, 4020, 4022, 4023, 4024, 4028, 4029, 4030, 4031, 4032, 4038, 4034

HERSTELLER		
Name	Adresse	Bevollmächtigte
SHANGHAI WISKING ELECTRIC MACHINE CO., LTD	PINGBEI VILLAGE, SITUAN TOWN, FENGXIAN DISTRICT, SHANGHAI, CHINA Tel: 0086 21 57142888-0 E-mail: w5668@126.com	Mr. Andy Hu Anding

BEVORMÄCHTIGTER VERTRETER		
Name	Adresse	Tel./email
L&G Technik GmbH & Co.KG	Im Gewerbepark 1,3 D 96155 Buttenheim	+49 (0)9545 35980-211 - Tel. +49 (0)9545 / 35980-29 - fax info@l-g-technik.de

BESTIMMUNGEN UND RICHTLINIEN		
Geräteklassifizierung	Angewandte Richtlinie	Angewandte Standards
Class 1 Rule _12_	Annex VII of MDD 93/42/EEC Council Directive	EN 12184:2014

Erklärt, dass die oben genannten Produkte den Bestimmungen der Richtlinie 93/42/EWG / mit Änderungs-Richtlinie 2007/47/EWG für Medizinprodukte entsprechen.

HERSTELLER BEVOLLMÄCHTIGTE: Mr. Andy Hu Anding
SHANGHAI WISKING ELECTRIC MACHINE CO., LTD

TITEL: Verkaufsleiter

UNTERSCHRIFT:

DATUM: 28-Dec-2018



12. SERVICE NOTIZEN